

CRITERES D'ACCEPTABILITE DES PRELEVEMENTS RECUS

FICHES DE TRANSMISSION	
Problème Rencontré	Décision
Manque Coordonnées Préleveur	Acceptation du prélèvement
<i>Le texte "non communiquée" apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin au niveau des coordonnées du préleveur.</i>	
Manque heure de prélèvement	Acceptation du prélèvement
<i>Le texte "non communiquée" apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin au niveau de l'heure de prélèvement.</i>	
Manque traitement et/ou posologie	Acceptation du prélèvement
<i>Le texte "non communiqué" apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin au niveau du traitement</i>	
Manque date de naissance	Cf. Identification des échantillons

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS	
Problème Rencontré	Décision
Absence totale d'identification ou identification illisible.	Refus du prélèvement
<i>Le texte "Annulation du prélèvement" apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin.</i>	
Identification partielle (tube non identifié complètement ou identification équivoque...)	Acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention d'une confirmation d'identité ECRITE par le préleveur. (ex de formulaire pour confirmation d'identité : confirmation d'identité).
<i>Le dossier ne sera validé par Biologiste et les résultats transmis au Patient et au Médecins qu'à réception du formulaire écrit de confirmation d'identité du Préleveur. La phrase suivante apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin : "Identification à posteriori par M. ou Mme xxx".</i>	
Manque nom de jeune fille pour le groupe sanguin	Acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention de l'information
<i>Aucune analyse de groupage sanguin ne sera réalisée sans obtention du nom de jeune fille.</i>	

PRELEVEMENT SANGUIN	
Problème Rencontré	Décision
Absence de demande d'analyse (tube en trop)	Echantillons conservés sous réserve d'une demande complémentaire. <i>(Sous réserve du compatibilité avec la durée de conservation des analytes.)</i>
Inadéquation tube/analyse	Si l'analyse est impossible ou si le tube ne correspond pas aux critères définis*: refus du prélèvement et demande d'un nouveau prélèvement.
*Critères de Validation des méthodes par le Laboratoire .Le texte "Analyse Annulée" avec la raison du refus apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin .	
Tube coagulé pour une analyse nécessitant du sang total	refus du prélèvement et demande d'un nouveau prélèvement.
Le texte "Analyse Annulée" avec la raison du refus apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin .	
Tube citrate (bleu) mal rempli ou coagulé	refus du prélèvement et demande d'un nouveau prélèvement.
Le texte "Analyse Annulée" avec la raison du refus apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin .	
Manque un ou plusieurs tubes ou prélèvement insuffisant en quantité.	refus de la demande : demande d'un nouveau prélèvement
Prélèvement hémolysé, lactescent ,ictériqueect	S'il y a une interférence possible avec la réalisation de l'analyse : refus du prélèvement et demande d'un nouveau prélèvement

DELAIS d'ACHEMINEMENT	
Les délais pré-analytiques correspondent au délai entre le prélèvement et le traitement technique de l'échantillon (centrifugation ou analyse).	
Problème Rencontré	Décision
Prèlèvement à Centrifuger ou à Congeler RAPIDEMENT.	refus de la demande : demande d'un nouveau prélèvement <i>Si le prélèvement t n'a pas été apporté au laboratoire dans l'heure qui suit la prise de Sang</i>
<i>Le texte "Prélèvement à effectuer au Laboratoire" apparaîtra sur le compte rendu de résultats du patient et du médecin .</i>	

DELAIS D'ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS SANGUINS NON RESPECTES

Analyses et délais pré analytiques*

Décision

Hémostase < 6h

Acceptation des prélèvements. En cas de résultats anormaux, un prélèvement complémentaire sera demandé au préleveur afin de réaliser un contrôle.

Hématologie < 6h

Lithium < 4h

Bilirubine, PSA libre, réserve alcaline, bicarbonate < 2h

Potassium, ferritine < 1h

Folates, vitamine B12 < 15min

Les délais pré analytiques correspondent au délai entre le prélèvement et le traitement technique de l'échantillon (centrifugation ou analyse).

AUTRES PRELEVEMENTS

Analyse

Décision

Bactériologie

TOUT PRELEVEMENT NE CORRESPONDANT PAS AUX PRECONISATIONS DE PRELEVEMENT ET CONDITIONS DE CONSERVATION SERA REFUSE

Recherche de sang dans les selles

Uniquement des selles réalisées dans la journée et apportées au laboratoire au plus tard à 16h en semaine et 11h le samedi.